



made for you!



JOYCEone

JOYCEone

Ihre 1. Wahl: zeitsparend und passgenau

Zeitraubendes Einstellen war gestern. Heute bieten wir Ihnen mit JOYCEone die Beatmungsmaske in einer Größe, die nahezu immer passt. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Maskenexpertise und als Nasal- oder Mund-Nasen-Variante erhältlich.

Hand in Hand: Wohlfühlkomfort und Therapieerfolg

Die Stirnstütze sorgt mit ihrem flexiblen Federprinzip automatisch dafür, dass sie immer therapiegerecht im richtigen Abstand stabil und zugleich komfortabel an der Stirn aufliegt. Ähnlich clever funktioniert der einschichtige Maskenwulst. Dank seiner optimierten Form findet er von selbst die ideale Position – unabhängig von der Nasen- bzw. Gesichtsgröße.

Durchdacht bis ins Detail

Ihre Patienten werden JOYCEone vom ersten Kontakt an lieben! Denn bei JOYCEone überzeugen nicht nur Passgenauigkeit und Tragekomfort, sondern auch die leichte Bedienung: Durch die unverwechselbare Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips mit Griffmulde lässt sich JOYCEone von Anfang an schnell und korrekt montieren.

Moderne Effizienz

Kurz und gut: Das intelligente JOYCEone-Prinzip unterstützt Sie, Ihre Zeit optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung machen zu müssen. JOYCEone – made for you!

Die Vorteile von JOYCEone

- Zeitsparend: Automatische Anpassung von Stirnstütze 3 und Maskenwulst 1
- Unverwechselbare Montage: Eindeutige Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips 4
- Wirtschaftlich: Eine Größe passt nahezu allen Patienten
- Bequem: Mühelose Reinigung
- Angenehm: Leises Ausatemsystem
- Stabil: Extrem belastbare Materialien


JOYCEone Nasal

Maskensitz bei verschiedenen Nasengrößen



JOYCEone Full Face

Maskensitz bei verschiedenen Nasen- und Gesichtsgrößen

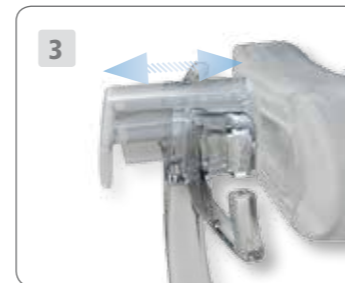

- 1 Maskenwulst
- 2 Stirnpolster
- 3 Stirnstütze
- 4 Bänderungsclip
- 5 Klettzungen
- 6 Druckmessanschluss
- 7 Reißleine (nur JOYCEone Full Face)



JOYCEone Nasal-Maske

JOYCEone Nasal



JOYCEone Full Face
Mund-Nasen-Maske

Ersatzteile

Kopfbänderung inkl. Bänderungsclips WM 25255 	Stirnstütze JOYCEone Nasal inkl. Stirnpolster, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 15907 	Drehhülse JOYCEone Nasal WM 26846 JOYCEone Full Face WM 26847
Bänderungsclips 2 Stück WM 25257 	Maskenwulst JOYCEone Nasal Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 25253 	Set Kugelen JOYCEone Nasal Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Verschluss WM 15908
Stirnpolster Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 26801 	Reißeleine Schnellentriegelung WM 26890 	Verschluss Druckmess- anschluss WM 26849
		Transportbeutel WM 26295

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter weinmann-medical.com

Technische Daten	JOYCEone Nasal		JOYCEone Full Face	
	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face
Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG	II a			
Abmessungen (B x H x T)	ca. 96 x 115 x 83 mm	ca. 120 x 150 x 100 mm		
Gewicht	87 g	100 g		
Therapiedruckbereich	4 bis 30 hPa			
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)			
Druckmessanschluss	Ø 4 mm			
Breite Bänderungsclip	24 mm			
Temperaturbereich ■ Betrieb: ■ Lagerung:	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +70 °C			
Strömungswiderstand ■ bei 50 l/min ■ bei 100 l/min			0,05 hPa 0,28 hPa	
Strömungswiderstand Notfallausatemventil ■ Inspiration bei 50 l/min: ■ Expiration bei 50 l/min:			– –	0,5 hPa 0,5 hPa
Schalldruck Notfallausatemventil ■ Öffnen: ■ Schließen:			– –	1 hPa 2 hPa
Angegebener Zweizahl- Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871 ■ Schalldruckpegel: ■ Schalleistungspegel: ■ Unsicherheitsfaktor:			15 dB(A) 23 dB(A) 3 dB(A)	
Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹			
Angewandte Normen	EN ISO 17510-2:2009			

¹ Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

Geräte-Bezeichnung	WM-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEone Nasal	WM 25260	14.24.16.2052
JOYCEone Full Face	WM 25290	In Beauftragung



83609-DE-11/2014 © Urheberrechtlich geschützt. Verweigerung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



made for you!



JOYCEone

Full Face