



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Direkt anwendbar und selbsthaftend
- Besonders hautschonend durch Hydrocolloid
- Hygienisch einzeln verpackt und unter Reinraumbedingungen produziert
- Schutz der Nasen- und Oberlippenregion durch Vergrößerung der Auflagefläche
- Bis zu 5 Tage verwendbar bei optimaler Hautverträglichkeit durch Hydrocolloid
- Latex-, Phthalat-, BPA- und Klebstofffrei

BESTELLINFORMATIONEN		
Artikelnummer	Größe	VE
nj0164s	S	20 Stück
nj0165l	L	20 Stück



# CPAPNose

Idealer Schutz der Nase während der CPAP Beatmung von Frühgeborenen

Homecare  
 Pneumologie  
 NEONATOLOGIE  
 Anästhesie  
 Intensivbeatmung  
 Schlafdiagnostik  
 Service  
 Patientenbetreuung

Die CPAPNose ist ein Hautschutz für die CPAP Beatmung von Frühgeborenen.

#### Bedienungsanleitung CPAPNose:

- Haut reinigen und entfetten. Bitte keinen Alkohol verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Haut sauber und trocken ist.
- Erwärmen Sie die CPAPNose, zum Beispiel in der Hand, für ca. 60 Sek.
- Lösen Sie die CPAPNose von der Basisplatte.
- Fixieren Sie die CPAPNose beginnend am Nasenbeinansatz.
- Streichen Sie vorsichtig die CPAPNose über den Nasenrücken.
- Fixieren Sie den schmalen Steg an der Nasenscheidewand.
- Drücken Sie den breiteren Steg unterhalb der Nase an (oberhalb der Lippe).
- Lassen Sie Ihre Handfläche auf der CPAPNose einige Sekunden ruhen. Die Wärme wird benötigt, damit das Produkt gut auf der Haut haftet.
- Danach können Sie wie gewohnt die CPAP Maske / Prong anwenden. Die Maske sollte auf der CPAPNose aufliegen.
- Zum Entfernen der CPAPNose benutzen Sie lauwarmes Wasser.
- Lösen Sie vorsichtig eine Ecke der CPAPNose mit einem in Wasser getränkten Tupfer und ziehen Sie langsam, mit Hilfe des getränkten Tupfers, die CPAPNose von der Nase.

#### Anwendungshinweise.

- Keine Verwendung von der geöffneten Einzelverpackungen
- Direkte Verwendung nach öffnen der Verpackung
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Entfernen des Produktes mit Wasser, um Hautschäden zu vermeiden

