



PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

BiPAP autoSV

DreamStation BiPAP autoSV – bestmögliche Atemunterstützung für Patienten bei **minimaler Intervention**

Die Bedürfnisse von Patienten mit zentraler Schlafapnoe, komplexer Schlafapnoe und/oder periodischer Atmung, etwa Cheyne-Stokes-Atmung, können sich im Laufe einer Nacht und von Nacht zu Nacht ändern. Das DreamStation BiPAP autoSV ist auf eine komfortable Behandlung dieser Patienten ausgelegt, die dann erfolgt, wenn sie benötigt wird, und so einen erholsamen Schlaf begünstigt.

Ausgelegt auf effektive Behandlung bei minimaler Intervention

Der klinisch bewährte Algorithmus des DreamStation BiPAP autoSV überwacht und stabilisiert die sich ändernde Atmung des Patienten. Er passt die Unterstützung automatisch an, damit der Patient bei jedem einzelnen Atemzug gut versorgt wird.

Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung

Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.

Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen

Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.

Auto-EPAP für offene obere Atemwege

Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.

Leistungsstarkes patientenorientiertes Design

Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt – praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.

Unterstützung für eine langjährige Nutzung

DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.

Effizienteres Arbeiten für Sie

Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.

BiPAP autoSV-Funktionalitäten

- Klinisch bewährter automatischer Pressure Support, Auto-Backupfrequenz und Auto-EPAP-Algorithmus
- Bi-Flex für mehr Komfort
- Flaches und diskretes Design
- Intuitives Benutzermenü
- DreamMapper-Kompatibilität
- Leistungsprüfung für Fern-Diagnose des Gerätes
- Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunk als Optionen für Konnektivität



Technische Daten

DreamStation BiPAP autoSV

Druckbereich	4–30 cm H ₂ O
Flex-Druckentlastung	0–3
Rampendauer	0–45 Min. (in 5-Minuten-Schritten)
Rampenanfangsdruck	4 cm H ₂ O EPAP min
Luftbefeuchtung	Warmluftbefeuchtung: fixiert, adaptiv, beheizter Schlauch
Datenspeicherkapazität (Minimum)	SD-Karte: min. 6 Monate on-board: 3 Monate.
Höhenanpassung	Automatisch
Filter	Grobstaubfilter (wiederverwendbar); Ultrafeinfilter (Einweg)
Steuerelemente	LCD, Drehregler/Schaltfläche
Gewährleistung	2 Jahre
Abmessungen	15,7 x 19,3 x 8,4 cm (ohne Befeuchter) 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (mit Befeuchter)
Gewicht	1,33 kg (ohne Befeuchter) 1,98 kg (mit Befeuchter) einschließlich Netzteil
Elektrische Anforderungen	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A

Bestellinformationen

DreamStation BiPAP autoSV	Artikelnummer
BiPAP autoSV	DEX900S13
Zubehör	
Netzteil, 80 Watt (Standard)	118499
DreamStation Tragetasche	1121162
DreamStation Link-Modul	1120293
DreamStation, Nonin SpO ₂ , Adapter	1121694
Oximetrie-Fingersensor, Erwachsene, Flex	953
Luftbefeuchtung	
DreamStation Warmluftbefeuchter mit Schlauchheizungsoption	DEXH
DreamStation Wasserkammer	1120670
Schläuche	
Performance-Schlauch, 15 mm (Standard)	PR15
DreamStation beheizter Schlauch, 15 mm	HT15
Filter	
Grobstaubstofffilter, wiederverwendbar, 1 St.	1122446
Ultrafeinfilter, Einweg, 1 Stück	1122447
Ultrafeinfilter, Einweg, 2 Stück	1122518
Ultrafeinfilter, Einweg, 6 Stück	1122519

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG Inc., die Nutzung dieser Marken durch Philips Respironics erfolgt unter Lizenz.
Wi-Fi ist ein Markenzeichen von Wi-Fi Alliance.

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



www.philips.de/respironics

TK 2/22/17 PN472571